



SPYLEDEKONTAMINATOR

CLINOX 3A AUTO

BRUKERMANUAL



P.A. de la Houssoye - rue Ambroise Paré - F 59280 BOIS-GRENIER
Tel +33.3.20.10.36.90 - Faks +33.3.20.35.95.95 - www.arcania.com

BRUKERMANUAL - CLINOX 3A AUTO - 9570ALU07NO 

A 07.04.2017

Side 1 / 10

INNHALDSFORTEGNELSE




1. IDENTIFISERING AV BEKKENVASKEREN	3
2. UTSLAGSFUNKSJON	3
3. DRIFT AV SPYLER.....	4
4. UTSTYRPPSETT	6
5. DRIFT AV SPYLER.....	8
6. DAGLIG VEDLIKEHOLD	8
7. GARANTIBETINGELSER.....	9
8. HÅNTERING AV ENHETENS KASSERING.....	10

1. IDENTIFISERING AV BEKKENVASKEREN

Typeskiltet på bekkenvaskeren gir brukeren viktig informasjon om utstyret.

Du finner typeskiltet bak døren hvor dunken med rengjøringsmiddel befinner seg. Det ser slik ut:

Eksempel:

	Parc d'activités de la HOUSOYE 59280 BOIS-GRENIER - FRANCE Tel: + 33 (0)3.20.10.34.10 Fax: +33 (0)3.20.35.95.95	 1370
REF <input checked="" type="checkbox"/> CLINOX 3A AUTO <input type="checkbox"/> CLINOX 3A TOTAL	SN 17 / 07 / 1324	<input type="checkbox"/> 120V <input type="checkbox"/> 1N+PE <input checked="" type="checkbox"/> 50Hz <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3N+PE <input type="checkbox"/> 60Hz <input checked="" type="checkbox"/> 400V <input checked="" type="checkbox"/> 3+PE IP X3
 2017-04-03 ΣQn 3,7 kW		

Symbolforklaring:



: Her ser du hvem som er produsenten. SOFINOR



: Viser fabrikasjonsdato, i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. I dette tilfellet: 2017-04-03



: Viser produktets varenavn. I dette tilfellet: CLINOX 3A AUTO



: Viser produktets serienummer. I dette tilfellet: 17/07/1324.



: Viser at utstyret er i samsvar med kravene som er definert i EU-direktivet CE/93/42. Konformiteten er erklært av en godkjent organisme registrert under nummeret 1370.

2. UTSLAGSFUNKSJON

Bekkenspyleren, i påvente av syklus, har lokket åpent. Slik kan den brukes som en vanlig utslagsvask. Bruken av bekkenvaskeren Clinox 3A Auto er 100% automatisert. Bekkenvaskeren er utstyrt med et system som identifiserer dine bevegelser.




P.A. de la Houssoye - rue Ambroise Paré - F 59280 BOIS-GRENIER
Tel +33.3.20.10.36.90 - Faks +33.3.20.35.95.95 - www.arcania.com

BRUKERMANUAL - CLINOX 3A AUTO - 9570ALU07NO 

A 07.04.2017

Side 3 / 10

Etter at du har tømt et kar, må du gjøre en rask bevegelse frem og tilbake, fra venstre til høyre, eller en bevegelse nedover foran skjermen. Tegnet  vises og bunnen av kummen spyles i minst 10 sekunder for å unngå at bunnfall blir liggende. Om nødvendig, gjenta utspyling.



3. DRIFT AV SPYLER

CLINOX 3A AUTO er beregnet for å tømme, rengjøre og desinfisere utstyr som tåler termisk desinfeksjon:

- Bekken
- Vaskefat
- Urinflasker
- Skifteboller
- Barnepotte
- Små enkle instrumenter
- Gulvbøtter
- Toalettseter

Bekken og urinflasker plasseres i holder, vippes tilbake og tømmes automatisk når lokket er lukket.

Rengjøringsprosessen har følgende faser :

- 1. gang: Forrengjøres med kaldt vann
- 2. gang: Rengjøres med varmt vann og såpe
- 3. gang: Termisk desinfisert med damp i henhold til normen A₀ 60

- Ved å trykke på den grå pedalen, vil du starte en **STANDARDPROGRAM** (beregnet for urinflasker og bekken kun med urin)
- Ved å trykke på den blå pedalen, vil du starte en **INTENSIVPROGRAM** (beregnet for bekken med avføring/papir samt for vaskefat)

Når program er valgt, vil lokket lukkes automatisk til 10 mm fra toppen av kammeret.

Etter 6 sekunders ventetid, låses lokket for hele programmet. Hvis noen trækker på en pedal under «lokk lukkes» , vil lokket åpnes.



ADVARSEL
IKKE LUKK ELLER ÅPNE LOKKET MANUELT
TRÅKK PÅ ÉN AV PEDALENE FOR Å ÅPNE DET

Et display på fronten gjør det mulig for brukeren å se viktig informasjon.



Displayet viser hvor programmet er og temperaturen inne i kammeret.



De forskjellige trinnene i programmet er:

- Forsvask med kaldt vann
- Forsvask med varmt vann
- Hovedvask med varmt vann og såpe
- Desinfisering
- Nedkjøling



Når rengjøring og desinfeksjon er ferdig, er programmet avsluttet og displayet viser valideringen av programmet.

4. UTSTYRPPSETT

4.1. 1 bekken + 2 urinbekken



- Plasser det fulle bekkenet uten å snu det i holderen (åpning opp)
Håndtaket på bekkenet mot hjørnet på kammeret
- Plasser bekkenlokket ned i bøylene/e på høyre side i kammeret
- Plasser de to urinflaskene, åpning ned mot bunnen, på de to holderne beregnet for dette



Plasser lokket vertikalt på høyre side i kammeret.



Plasser småtingskurven vertikalt på høyre side i kammeret.

4.2. Bøtte / store beholdere



- Fjern universalholderen.
Plasser spesialholderen for bøtter i kammeret.
- Tøm bøtten ved å vende den og deretter plasser den på holderen.
- Plasser bøtta over holderen
- Bøtter må kjøres alene

MÅ BESTILLES SEPARAT (3080ALB 310)

4.3. 1 vaskefat / bolle



- Plasser vaskefatet med åpningen opp uten å tømme det, i holderen

4.4. «pussbekken» i rustfritt stål



- Fjern universalholderen.
- Plasser innsatsen for pussbekken i kammeret.
- Plasser pussbekkene i holderen.

MÅ BESTILLES SEPARAT (3080ALB 350)

4.5. 2 vaskefat



- Fjern universalholderen
- Plasser fat- holderen ned i kammeret.
- Plasser de to fatene i holderen på hver side og med åpningen mot midten

5. DRIFT AV SPYLER

Om lokket ikke åpnes etter at du har aktivert et av programmene (med foten) ; Sjekk informasjon på skjermen.

Kontroller at vanntilførselen/e er åpne (jf «feilhåndtering» § 3 i brukermanualen).

Hvis feilen opprettholdes kontakt teknisk personale

Hvis det i løpet av at vaskeprogram, lokket halv-åpnes automatisk; se etter feilkode som vises på displayet. Deretter start programmet på nytt i henhold til prosedyrene som er beskrevet i installasjons- og vedlikeholdsmanualen.

Hvis displayet viser feilkode # D05, sjekk avløpet i maskinene for fremmedlegemer – kontroller og fjern event gjenstander. Bruk handsker.

ADVARSEL

- **IKKE PRØV Å SENKE ELLER LØFTE LOKKET MANUELT.**
- **ALLE REPARASJONER MÅ UTFØRES AV KYNDIGE TEKNIKERE**
- **I NØDSFALL, SLÅ AV STRØMFORSYNINGEN UMIDDELBART.**
- **VED LUKKING AV LOKKET, ER DET FARE FOR KLEMMING. IKKE LA HENDER ELLER ANDRE KROPPSDELER BEFINNE SEG MELLOM TOPPEN OG LOKKET UNDER LUKKINGEN.**

6. DAGLIG VEDLIKEHOLD

Det daglige vedlikeholdet skal utføres av brukerne.

1. fase:

Ved behov kan vaskekammeret rengjøres med kalkfjerningsprodukt

2. fase:

Maskinens utvendige plater og lokk kan rengjøres med mildt såpevann og om prosedyrer tilsier det kan den tørkes av med desinfeksjonsmiddel

3. fase:

Kjør et program uten gods i maskinene for å skylle ut event, såperester



**IKKE RENGJØR MASKINEN MED
HØYTTRYKKSSPYLING**



Brukeren vil bli informert om det gjenværende vaske-/avkalkningsmiddelet takket være info på displayet. Bytt ut kanne ved behov- plasser sueslange og nivåsensoren i ny kanne. Deretter kontrollerer du at feilkoden forsvinner ved å trække på én av pedalene.

7. GARANTIBETINGELSER

Garantien omfatter reservedeler, arbeidstimer og event transport.

Den dekker alle produkt - og komponentfeil.

Eventuelle reparasjoner vil bli utført så snart som mulig. Ta kontakt med den du har kjøpt maskinen fra.

Garantien ugyldiggjøres ved:

- Tilkobling til en upassende strømspenning
- Reparasjoner utført av noen andre enn en godkjent tekniker eller personer som er autorisert til å gjøre det.
- Alle feil på grunn av feilbruk eller skade.
- Alle uavhengige feil som er forårsaket av:
 - Mangler vann
 - Tette filtre
 - Mangler elektrisitet
- Vaske-/avkalkningsmiddel ikke samsvarende med produkt påkrevd (anbefalt)
- Blokkert avløpsrør pga. feilbruk

Bruk av enheten som ikke er i henhold til produsentens instruksjoner kan endre dens beskyttelse og dens brukere




Den myndighet som har ansvaret for utstyret (institusjonene) må sørge for at alle ansatte som arbeider på dette utstyret er opplært i sikker bruk eller vedlikehold, og at denne opplæringen er gitt regelmessig.

8. HÅNDTERING AV ENHETENS KASSERING

Denne enheten består ikke bare av resirkulerbare materialer, men også skadelige materialer. Dette er grunnen til at du ikke kan kassere den i vanlig avfall.

Enheden kan være kontaminert. Det er derfor nødvendig å desinfisere den før resirkulering.

Symbolet for avfallsdeponering gjeldende i europeiske land

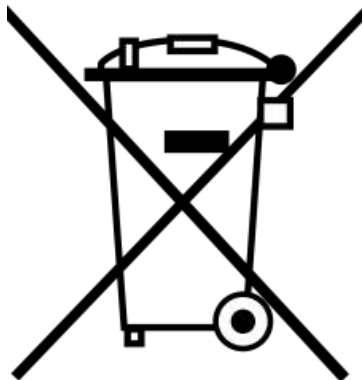

Dette symbolet indikerer at dette produktet må kasseres separat..

De følgende regler gjelder kun i europa.

*Denne enheten må kasseres separat ved et egnet innsamlingspunkt.

Ikke kasser denne enheten i vanlig avfall.

* For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med lokale myndigheter med ansvar for avfallshåndtering.