

Når "OPEN" lyser betyr det at døren er åpen.



Når "CLOSED" lyser betyr det at døren er lukket.




PROGRAMMERING-knapp. Ved å holde den inne i 5 sekunder, får du tilgang til menyen for å endre innstillinger, passord kreves.



TEMPERATUR-knapp. For å velge temperatur før du starter programmet:

- 50grC : pustebagger, slanger, tepper og tekstiler.
- 60grC : pustebagger, slanger, tepper og tekstiler.
- 70grC : pustebagger, slanger, tepper og tekstiler.
- 80grC : kir.instrumenter i stål og andre materialer som tåler høy temperatur.
- 90grC : kir.instrumenter i stål og andre materialer som tåler høy temperatur.

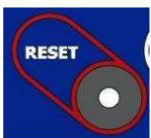

RESET. For å nullstille alarm.

Når du holder knappen inne i 5 sekunder, avbrytes programmet og går tilbake til start. Den brukes også i USB-nøkkeleny for å gå tilbake til menysidene.



START. Starter programmet etter at du har valgt program (når døren er lukket).



ØKE TØRKETIDEN. Med denne knappen kan du øke tørketiden (må velges før programmet startes)



REDUSERE TØRKETIDEN. Med denne knappen kan du redusere tørketiden (må velges før programmet startes)