

## BRUKSANVISNING AUTOKLAVE

Frontpanelet er utstyrt med brytere, signallamper og tre display.  
Et lett trykk på bryterne aktiverer en funksjon.

Tre displayer som viser: **Tid**(øverst), **Temperatur**(i midten) og **Trykk**(nederst)

Fire signallamper øverst på frontpanelet viser hvor langt steriliseringsprogrammet er kommet!

**VACUUM- STERILIZE(ca.5 min.) –DRY(ca.10 min.) READY(ferdig)**

Signallampe H2O max/min: Lyser og angir maks eller min. Nivå i vanntanken.

Signallampe H2O max: Lyser når vanntanken for "brukt" vann er full og må tømmes. Koble "hurtigkoblingen" på medfølgende slange til uttaket merket "Waist Water" nederst på fronten og la vannet renne ned i f.eks. en bøtte.

Signallampe for valgt program: **1-2-F-S BOWIE & DICK**  
Markerer valgt program.

### ENKEL PROSEDYRE:

**Trykk "POWER";** Autoklaven aktiveres, automatisk selvtest utføres og forvarming av steriliseringskammeret starter.

**Trykk 1;** Program **1** er nå valgt!  
Sterilisering v/min. 134°C i ca. 5 minutter, displayet teller ned til 0.  
NB! Pakkende instrumenter legges med pappersiden opp!

**Trykk START/STOPP;** Denne knappen **starter** det valgte programmet, kan også trekkes på dersom valgt program ønskes avbrutt.  
Ved fullført steriliseringsprogram må denne knappen trykkes på før døren åpnes! Om en alarm inntreffer må denne knappen trykkes på før døren kan åpnes!!

**Stand by/"dvale":** Maskinen slår seg automatisk av 30 minutter endt sterilisering.  
Trykk **Power-knappen**, maskinen gjør en "auto test" før døren kan åpnes.

### **Bowie & Dick test:**

Testen utføres når maskinen er skrudd på og er klar. Legg inn Bowie & Dick test i kammer. Legg inn Bowie & Dick test i kammer, hold inne **test** knapp og trykk **Start/Stop**. Maskinen starter da tre vakuum pulser, en temperatur på 134°C og en tid på 3,5 min.