


BRUKERVEILEDNING FOR AF2.60 OG AF2.90 SPYLEDEKONTAMINATORER

Manuell luke

DØR

Trykk inn fotbryteren for automatisk åpning og stenging av luke. Ikke i funksjon når et program er aktivert. Manuelle maskiner må åpnes /lukkes manuelt.

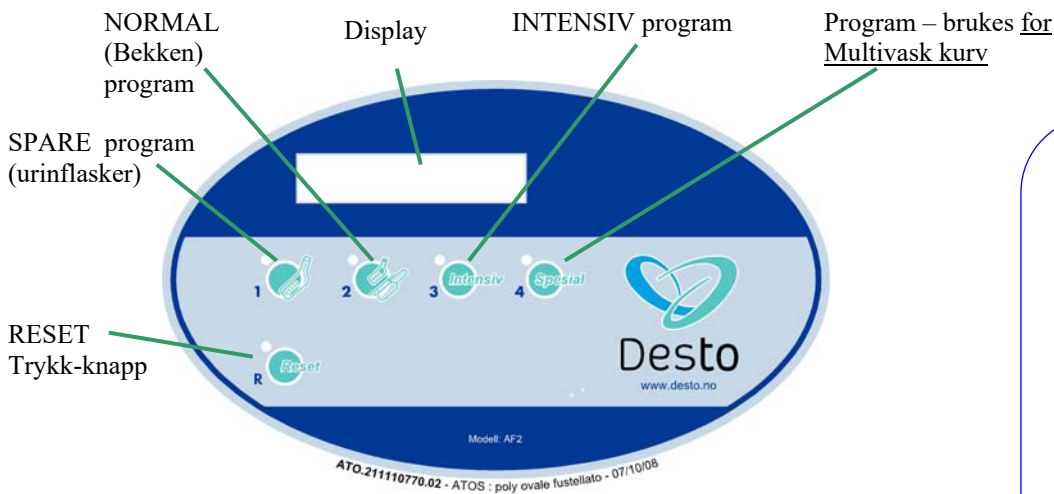

Trykk knapp **1** for å starte et **SPARE** program, anbefales på urin i flaske eller i bekken. I maskiner med automatiske dører vil døren automatisk lukkes etter at et program er valgt.



Trykk knapp **2** for å starte et **NORMAL** program, beregnet for bekken med avføring og papir. I maskiner med automatiske dører vil døren automatisk lukkes etter at et program er valgt.

INTENSIV

Trykk knapp **3** for å starte et **INTENSIVT** program, tilpasset for krevende rengjøringsoppgaver. I maskiner med automatiske dører vil døren automatisk lukkes etter at et program er valgt.

RESET

Trykk knapp **R** for å omstarte maskinen hvis det har utløst noen alarm.

SPESIAL

Trykk knapp **4** for å starte et program, når du skal bruke multivask kurven.



OBS: Luken åpner seg ca 5 cm etter programslutt på maskiner med automatisk luke.

Prosedyre hvis følgende alarm vises i displayet:

**E18: Tomt for såpe
Vent tømning**

Erstatt den tomme kannen med en ny. Kannen står plassert i underskapet.

Vent mens maskinen fyller opp såpesystemet, programmet som pågikk når kannen ble tom vil restarter automatisk

Påse at sugelansen sitter godt i den nye kanna med såpe.