

BRUKSANVISNING

CLINOX 3A AUTO



BRUKSANVISNING

- ✓ Maskinen er fotbetjent, både lukefunksjon og START funksjon.

INGEN BERØRING MED HÅND ER NØDVENDIG.

- ✓ **UTSLAGSFUNKSJON** passerer hånd foran skjermen, utseendet på ikonet under cons:



STANDARD PROGRAM

« Anbefalt for urinflasker og lettere forurenset gods »



- ✓ Plasser godset i maskinen iht instruks.
- ✓ Trykk ned den grå fotbryteren for å starte prosessen. Luken vil automatisk lukkes og forblir lukket under hele prosessen.
- ✓ Trykk ned den grå fotbryteren igjen når programmet er ferdig – da åpner lokket.



INTENSIV PROGRAM

« Anbefalt på bekken med avføring, vaskefat og på annet sterkt forurenset gods »



- ✓ Plasser godset i maskinen iht instruks.
- ✓ Trykk ned den blå fotbryteren for å starte prosessen. Luken vil automatisk lukkes og forbli lukket under hele prosessen.
- ✓ Trykk ned den blå fotbryteren igjen når programmet er ferdig – da åpner lokket.

