


## BRUKERVEILEDNING FOR AF2.45 OG AF2.75 SPYLEDEKONTAMINATORER



Manuell luke

Manuelle maskiner åpnes /lukkes manuelt.

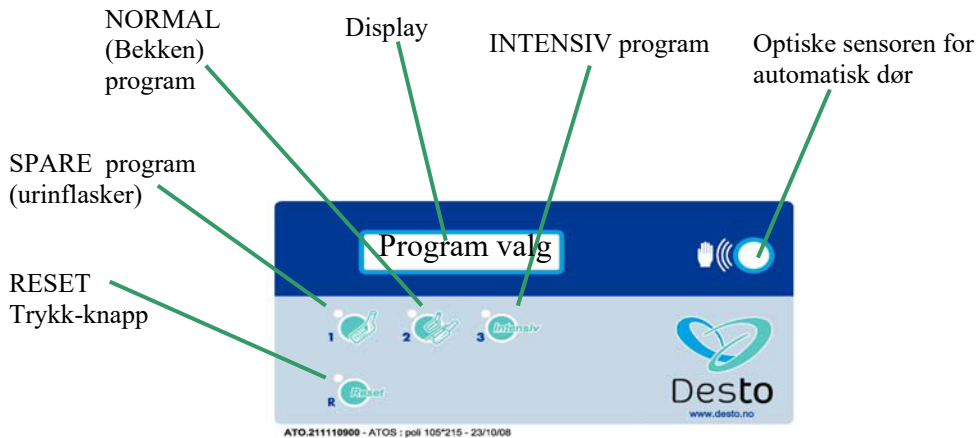

Trykk knapp **1** for å starte **SPARE** program, anbefales kun til urinflasker. I maskin med elektrisk dør vil døren automatisk lukkes at et program er valgt.



Trykk knapp **2** for å starte et **NORMAL** program, beregnet for bekken med avføring og papir. I maskiner med automatiske dører vil døren automatisk lukkes etter at et program er valgt.

### INTENSIV

Trykk knapp **3** for å starte et **INTENSIVT** program, tilpasset for krevende rengjøringsoppgaver. I maskiner med automatiske dører vil døren automatisk lukkes etter at et program er valgt.

### RESET

Trykk knapp **R** for å omstarte maskinen hvis det har utløst noen alarm.



Automatiske luke



Dør åpning / lukking fotpedal.

Prosedyre hvis følgende alarm vises i displayet:

### **E18: Tomt for såpe** **Vent tømming**

Erstatt den tomme kannen med en ny. Kannen står plassert i underskapet.

Vent mens maskinen fyller opp såpesystemet, programmet som pågikk når kannen ble tom vil restartes automatisk

Påse at sugelansen sitter godt i den nye kanna med såpe.