


BRUKERVEILEDNING FOR AF2 P-LINE SPYLEDEKONTAMINATORER

LCD Grafisk og Beskrivende SPARE program NORMAL program INTENSIV program SLOPSINK program

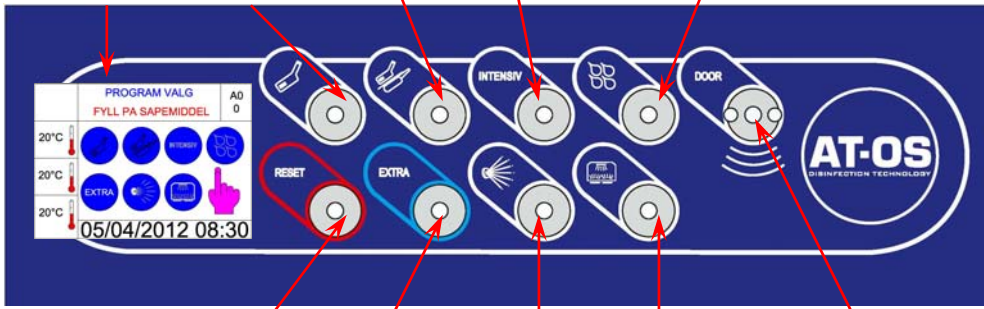

RESET key EXTRA program SOLVENT program MULTIWASHER program Dør infrarød sensor

Dør Infrarød Sensor: brukes til å starte åpning / lukking av den automatiske døren. For å starte døren bevegelsen du må holde hånden foran sensoren og vent til lyset i symbolet blir grønt (rundt 1 sekund).




Dør åpning / lukking fotpedal.



Trykk på knappen for å starte SPARE program. **Passer KUN for vask av urinal flasker med væske skitt.**



Trykk på knappen for å starte NORMAL program. **Passer KUN for vask av urinal flasker og bekken med fast og flytende skitt.**



Trykk på knappen for å starte INTENSIV program. **Passer KUN for vask av bekken med tøff smuss.**



Trykk på knappen for å starte dump vasken ringen vaskeprogram.



EXTRA program brukes som Special Program (hvis det kreves av kunden) eller som UPS ((Ultra Prewash System) program.



HDS (High Disinfection System): Spesielt program for å fjerne bakterien Clostridium difficile og for å få bedre vaskeresultat. Trykk på knappen før du velger ønsket vaskeprogram (SPARE, NORMAL eller INTENSIVE).



MULTIWASHER program brukes som vask og desinfeksjon program når maskinen er plassert kurven multiwasher AF66.

Hvis en knapp ikke lyser betyr at programmet ikke er aktivert. Hvis du berører en av disse knappene, får du beskjed om "Program ikke aktivert".

Når du trykker på en knapp for å starte et program du må bo på knappen i 1 sekund før symbolet blir grønt.

E18: Tomt for såpe

PROSEDYRE HVIS FØLGENDE ALARM VISES I DISPLAYET:

Erstatt den tome kannen med en ny. Kannen står plassert i underskapet. Påse at sugelansen sitter godt i den nye kannen med såpe.