


## Hvordan gå inn i programmet på en SMEG og gjøre endringer

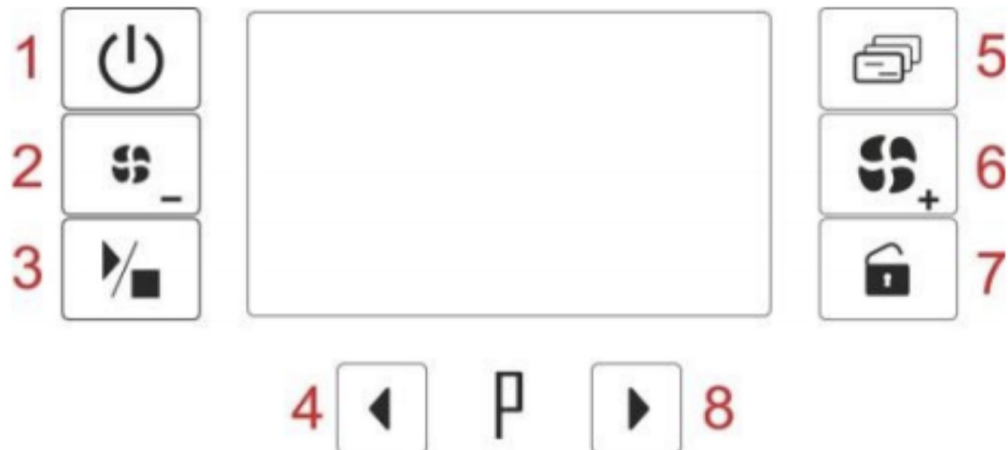

- a. Hold inne funksjonsknappen (5) i 5 sekunder. 4 streker vil vises i displayet
- b. Bruk piltastene (4/8) til å legge inn passordet 2222
- c. Mellom hvert tall bruk funksjonsknappen (5) til å flytte til neste plass
- d. Når alle 4 tall er lagt inn og passordet er komplett - hold inne start/stoppknappen (3)
  - a. om passordet er lagt inn riktig, blir "set" (settings) vist i displayet
  - b. er passordet lagt inn feil vil du høre 2 "beep"
- e. Når du er inne i menyen kan du med velge med funksjonstasten(5) de ulike funksjonsområdene.

Parametre som kan være aktuelle å endre i "Set" menyen

- 1 såpepumpe. Står innstilt fra fabrikk på 5. Kan økes eller reduseres ved behov ved å bruke piltastene (4/8)
- 2 tørremiddelpumpe. Står innstilt fra fabrikk på 3. Kan økes eller redusere ved behov ved å bruke piltastene (4/8)
- 5 dør åpnes automatisk ved programslutt. Funksjonen er "on" fra fabrikk, kan stilles i "off" med piltasten
- 7 varmtvann/ demin vann. Står som aktivert fra fabrikk (dn) - må deaktiveres om varmtvann ikke kobles til (--)

Trykk start/stopp-knappen for å lagre endringene