







BRUKSANVISNING SMEG GW0160 VASKEDEKONTAMINATOR

Slå på maskinen på ved å holde inne  knappen i 2 sekunder.

Dør åpnes ved å trykke på  knapp.

Velg program med knappen   hold inne start knappen  i 2 sekunder, to pip høres og maskinen starter.

BETJENINGS PANEL SYMBOLER			
SYMBOL	FORKLARING	SYMBOL	MEANING
	Av/På		Funksjoner
	Start / Stopp		Døråpner
	Valg		Valg

ID	GW-VASKEOONTAMINATOR
PR 6	Termisk desinfeksjon 85 ° C - 5 minutter holdetid
PR 7	Termisk desinfeksjon 85 ° C - 10 minutter holdetid
PR 8	Service - drift av slangepumper, inntak av vaskemiddel + skylling

Vi anbefaler at Program 7 benyttes.

Program 1-5 har ikke godkjent desinfeksjons fase.

***Standard maskin har såpedispenser for pulver i døren.
Har maskinen 2 doserings-slanger så skal den hvite slangen i såpe-
kannen mens den oransje slangen skal i tørremiddel.***

Sørg for at det ALLTID er middel på disse.



Desto AS Tlf: 400 70 205