

21.4 Periodisk vedlikehold

Maskinene vil varsle når det er tid for ettersyn/vedlikehold.

Maskinene er programmert til å varsle i displayet " E 44 Maintenance" hver 2000 utførte programmer.

Om maskinen utfører mindre enn 15 programmer per dag skal allikevel periodisk ettersyn gjennomføres med faste intervaller. (minimum 1 gang per år)

Under følger en tabell som viser hvilke kontrollpunkter på maskinene som bør utføres ved ulike tidspunkt.

- | | |
|--|---|
| <p>A Sjekk de roterende dysene</p> <p>B Sjekk dørpakningen</p> <p>C Sjekk el. Inntakskoplingen på hovedkortet</p> <p>D Sjekk og event rengjør inntaks magnetventiler</p> <p>E Sjekk avløpet og vannlåsen</p> <p>F Rengjør magnetventilen til påfylling dampgenerator</p> <p>G Gjør en visuell sjekk at dørpakningen</p> <p>H Kontroller døråpner sylindren</p> <p>I Sjekk slangene til såpepumpen</p> <p>J Sjekk trykkslangen som går inn på vannlåsen(tett avløps funksjon)</p> <p>K Kontroller dysene for slitasje og for urenheter</p> <p>L Rengjør nivåføleren i vanntanken</p> | <p>M Sjekk(når montert) lukens automatiske drift og smør bevegelige deler</p> <p>N rengjør vanninntak filtrene</p> <p>O Mål varmeelementene og gjør nødvendige utskiftinger</p> <p>P Bytt frontdekal (om nødvendig)</p> <p>Q Sjekk hovedpumpen for lekkasjer</p> <p>R Rengjør damp dysen</p> <p>S Kontroller el.tilkoblingene på varmeelementene</p> <p>T Kontroller dampgeneratorens nivå regulator/ rengjør ved behov</p> <p>U Sjekk såpepumpe og sugeslager samt nivåbryter i såpekanne</p> <p>V Intervall test (kjør et program, registrer alle temperaturer, dos.mengde såpe etc)</p> <p>W Kontroller maskinen for jordfeil</p> |
|--|---|

INTERVALL	ANTALL PROGR	FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD									
-	500*	T	A	K	B	R					
6 mnd.	2000	T	A	K	B	R					
1 år	4000	N	T	G	C	D					
1 år 6 mnd	6000	T	E	U	F	V	W				
2 år	8000	H	I	N	J						
2 år 6 mnd	10000	C	L	T	U	G	K	M	L	U	S
5 år	20000	O	P	Q							

Note. Forebyggende vedlikehold bør gjennomføres ved angitte tidsintervaller eller når antallet utførte programmer er nådd.



Vedlikehold av maskinene må gjennomføres for å sikre kontinuerlig drift og for å sørge for at maskinen utfører den oppgaven de er satt til mtp rengjøring og desinfeksjon



Har du gjennomført et vedlikehold og allikevel har problem med maskinen kontakt DESTO og forklar hva problemet går ut på (husk alltid å oppgi serienummeret på maskinen)

DESTO med partnere kan tilby service og vedlikeholdsavtaler.
 Ta kontakt for å avklare ditt behov.



Har du problemer med kalk eller farging av vaskekammeret (blir hvitt, brunt eller matt) Ta kontakt med DESTO for å få råd.