


Vaskedekontaminator AWD 655 -2X

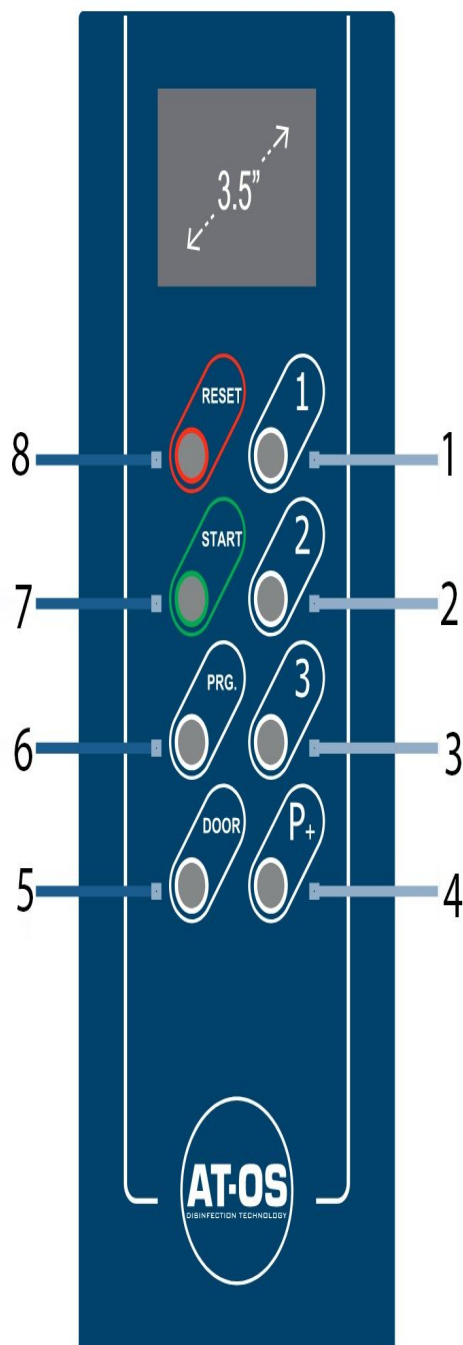

Åpne døren ved å trykke på DOOR (5)

Fyll maskinen med urene instrumenter.

Steng døren.

Velg program 1-3

1. **Kortprogram**
2. **Normalprogram**
3. **Intensivprogram**

TRYKK START (7) TO GANGER
ETTER HVERANDRE.

Maskinen vil fortløpende informere på
displayet hva som pågår.

Ved endt prosess vil det stå "FINISH"
på displayet. Åpne døren ved å trykke
på DOOR (5)

Man kan stoppe prosessen ved å
trykke og holde inne RESET (8)
knappen i 10 sekunder.

Maskinen vil varsle når såpebeholder
er tom. Såpebeholder befinner seg bak
den nedre luken på maskinen.